

Biocut-M

Dispositivo automatico riutilizzabile
per biopsie su tessuti molli

Codice: Biocut-M

A



B



C



D



E



F



G



CE

biomedical



Biocut-M

Dispositivo automatico riutilizzabile
per biopsie su tessuti molli

Codice: Biocut-M

Istruzioni per l'uso:



Aprire il coperchio
ed inserire l'ago PG
nel dispositivo



Quando gli indicatori
sono verdi
Biocut-M è caricato




Chiudere il coperchio
Usare il pistone sinistro
per caricare la cannula


PUSH



Premere il pulsante
di sparo

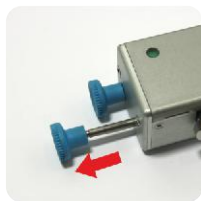

Usare il pistone
destro per
caricare il mandrino

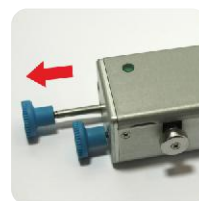


Usare il pistone
sinistro per
scaricare il campione

Per ordinare:

CODIE
BIOCUT-M

CONFEZIONE
I

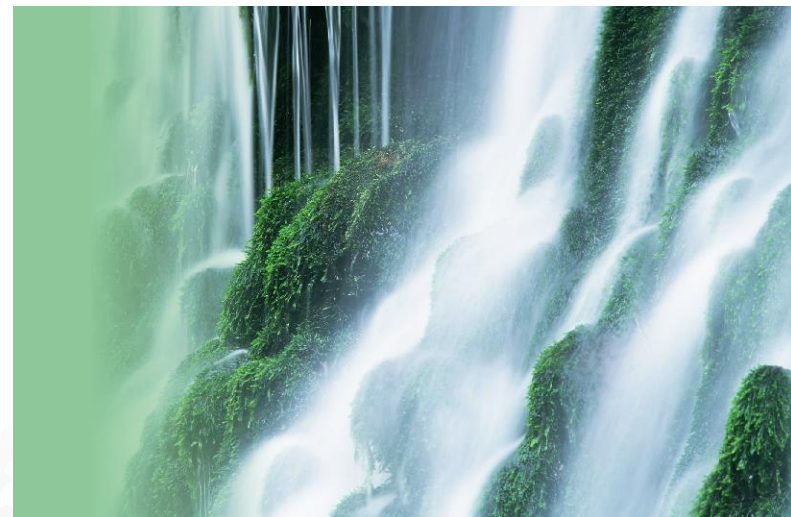

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Bone biopsy needles

Guillotine needles for biopsy on soft tissues

Cyto-aspiration needles

Different specialistic needles and sets

Loco-regional anaesthesia needles and sets

Thermic and absorbing sheets