

Bioshot

Ago monouso a ghigliottina automatico
per biopsie su tessuti molli

Codice: OBS



Sicura



Pulsante basso
per lo sparo



Pulsante alto
per lo sparo




Cursore per
la carica
del mandrino




Cursore per
la carica
della cannula



Scelta tra
due profondità
di campionamento

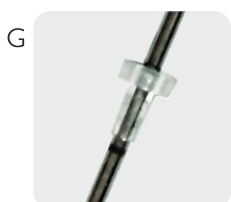

Stopper scorrevole
Marcatore ecogeno interno
Cannula centimetrata

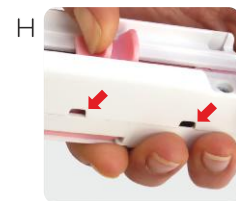

Indicatori
di carica
colorati

CE
0426


biomedical

Bioshot

Codice: OBS

Ago monouso a ghigliottina automatico per biopsie su tessuti molli

Istruzioni per l'uso:

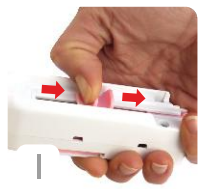


1 Caricare il cursore della cannula fino allo stop (click di aggancio). Caricare il cursore del mandrino fino allo stop (click di aggancio).



2 Quando è completamente carico, i due indicatori di carica sono colorati.




3 Scegliere la profondità di sparo muovendo l'apposito selettore nella posizione lunga o corta.

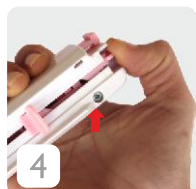

4 Mettere la sicura nella posizione LOAD.



5 Premere il pulsante di sparo superiore*

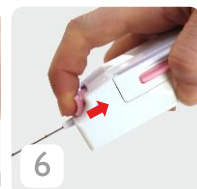

6 O in alternativa premere il pulsante di sparo inferiore*



7 Per estrarre l'ago: Caricare il cursore della cannula fino allo stop (click di aggancio) per scoprire il mandrino e recuperare il frustolo.

(*) Il dispositivo può essere usato come semiautomatico premendo lievemente il pulsante:



A La prima pressione fa partire il mandrino.



B La seconda pressione fa partire la cannula.

Se gli indicatori non sono colorati il dispositivo è scarico.

Per ordinare:

CODICE	MISURE	CONFEZIONE	C. COLORE
OBS 1410	14Gx10 cm	20	VERDE SCURO
OBS 1415	14Gx15 cm	20	VERDE SCURO
OBS 1420	14Gx20 cm	20	VERDE SCURO
OBS 1610	16Gx10 cm	20	BIANCO
OBS 1615	16Gx15 cm	20	BIANCO
OBS 1620	16Gx20 cm	20	BIANCO
OBS 1625	16Gx25 cm	20	BIANCO
OBS 1810	18Gx10 cm	20	ROSA
OBS 1815	18Gx15 cm	20	ROSA
OBS 1820	18Gx20 cm	20	ROSA
OBS 1825	18Gx25 cm	20	ROSA



Sono disponibili su richiesta aghi con differenti lunghezze e diametro 20G.

biomedical

Biomedical Srl Via G.B.Lulli, 43 50144 Firenze Italy
Tel +39 055 352678 +39 055 332822 Fax +39 055 331629
www.biomedical-bio.net info@biomedical-bio.net

Aghi per biopsia ossea

Aghi a ghigliottina per biopsia di tessuti molli

Aghi per cito-aspirazione

Aghi specialistici e set

Aghi e set per anestesia loco-regionale

Teli termici e tappetini assorbenti